



MGMove



**El mejor reloj inteligente con capacidades
integradas para protección de vida**

Con tecnología 4G LTE

Detalles del producto

A Botón de ayuda SOS (rojo)

Mantén presionado durante 5 segundos para realizar una llamada de emergencia. Una pulsación rápida también puede llevarte de vuelta a la pantalla anterior.

B Botón de suspensión/activación (negro)

Mantén presionado durante 20 segundos para reiniciar el sistema si es necesario. Cuando el dispositivo se quede sin batería y se coloque en la base de carga, es necesario presionar este botón durante 20 segundos para encenderlo.

C Correa ajustable

La hebilla de metal y la correa de goma trabajan juntas para proporcionar un ajuste perfecto. **Debes desabrochar la correa para cargar tu dispositivo.**

D Luz de indicación de señal

En la pantalla del reloj, un punto indicará la intensidad de la señal: la luz verde significa buena señal, la amarilla, señal variable (de buena a baja), y la roja quiere decir que no hay señal.

E Luz de estado de la batería

Al colocar el reloj en la base de carga, la luz indicará el estado de la carga: la verde significa carga completa, la amarilla que no está cargando (ajusta la base) y la roja que la carga esta por debajo del 97%.

¿Qué hay en la caja?



MGMove



**Base de
carga**



**Adaptador de
corriente y
cable USB**

Funciones principales

Tu dispositivo está lleno de funciones útiles que puedes acceder con un simple deslizamiento de tu dedo. Para acceder a tus aplicaciones, toca la pantalla del reloj.



La llamada
se está
realizando



Llamada
en curso

Realizar una llamada de emergencia

La aplicación SOS es una de las dos formas de activar el dispositivo para solicitar ayuda a nuestro centro de monitoreo. Toca el ícono SOS en la pantalla o mantén presionado el botón físico SOS (rojo) en el lateral del reloj durante 5 segundos, asegúrate de mantener presionado durante toda la cuenta regresiva. Si la activación fue accidental, puedes cancelarla dentro de esos 5 segundos.





**Prueba
en curso**



**Contador
de pasos**



**Vista
semanal**

Prueba del dispositivo

TEST

Es recomendable probar el dispositivo al menos una vez al mes. La aplicación de prueba permite verificar su funcionamiento sin enviar una alerta real a un agente. El dispositivo indicará si la prueba se completó con éxito.


Contador de pasos



La aplicación de pasos registra la cantidad de pasos diarios y semanales. Para ver tu progreso semanal, selecciona "Semana" y desplázate hacia abajo. Para establecer una meta, ve a la configuración dentro de la aplicación de pasos y usa los botones + o -. La opción de reinicio se puede usar para restablecer tu objetivo a 0. Una vez que el objetivo haya sido ajustado, presiona el botón (rojo) de retroceso para volver a la pantalla principal.



Clima

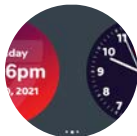

Opciones
de caratula



Apagando

Clima



La aplicación del clima mostrará las condiciones actuales según la ubicación del dispositivo.

Configuración



Aquí puedes cambiar el estilo de la carátula de tu reloj o actualizar tu preferencia de "sacudir para activar". Para cambiar la carátula de tu reloj, toca la opción "carátula de reloj". Desliza para ver la carátula que prefieras y tócala. El toque guardará tu selección. Toca el botón SOS para regresar. La opción de "sacudir para activar" estará desactivada. Activar "sacudir para activar" puede disminuir la duración de la batería.

Apagado del dispositivo



Para apagar el dispositivo, usa la aplicación de apagado. Para volver a encenderlo, mantén presionado el botón negro durante 5 segundos o colócalo en la base de carga.


Aplicaciones del círculo de soporte

Si deseas comprar estas aplicaciones adicionales para tu dispositivo, llama al **1 (800) 313-1191**.

Recordatorios




Los recordatorios creados en nuestro portal en línea pueden ser enviados y revisados por el destinatario de atención. El usuario recibirá una alerta de que el evento ha sido enviado. Los recordatorios se envían 15 minutos antes del evento, a menos que se indique lo contrario. Pueden ser revisados en cualquier momento del día tocando el ícono de recordatorios. El número en el ícono muestra la cantidad de recordatorios pendientes para el día. Puedes desplazarte por los eventos del día y se restablecerán al día siguiente.

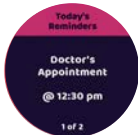

Revisar todos los eventos próximos para el día.



**Enviar nuevo
mensaje**

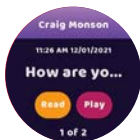

**Mensajes
en espera**



**Responder
o Borrar**



Mensajes

La aplicación de mensajes permite a los cuidadores comunicarse con el usuario a través de nuestro portal en línea y la aplicación. El ícono de la aplicación de mensajes muestra la cantidad de mensajes en espera. Toca el ícono de mensajes para comenzar.

Enviar nuevo mensaje

Los miembros del círculo de cuidado deben ser configurados a través del portal para poder recibir mensajes del



Mensaje de grabación



Revisar, volver a intentar o enviar



Alerta de nuevo mensaje

usuario. Para enviar un nuevo mensaje, el usuario tocará las iniciales del miembro del portal al que desea enviar el mensaje. El usuario tendrá la opción de grabar un mensaje de voz o utilizar una declaración preescrita.

Revisando mensajes en espera

Para ver los mensajes en espera (mensajes que no han sido eliminados ni respondidos), toca el ícono de mensajes en el centro. Desliza hacia adelante y hacia atrás para previsualizar los mensajes.

Respuestas a mensajes

Al ver los mensajes entrantes, el usuario puede leer o reproducir el mensaje, luego responder o eliminarlo. Las respuestas del usuario pueden ser devueltas al remitente como un "sí",


"no" o la opción de dejar una grabación de audio de 60 segundos. o menos. En caso de una grabación, tendrán la opción de revisar, volver a grabar, enviar o cancelar el mensaje.

Alertas de nuevos mensajes

Cuando se recibe un mensaje por primera vez, sonará una alerta y se mostrará una pantalla de vista previa del mensaje. El usuario puede tocar el ícono de "ver mensajes" para leer el mensaje completo.

Duración de la batería e intensidad de señal

NOTA: Para ver el porcentaje de la batería, desliza el dedo desde la parte superior de la pantalla del reloj hacia la parte inferior de la pantalla (mostrado a la derecha). La duración esperada de la batería es de hasta 24 horas.

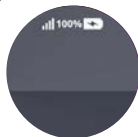

| Luces | Estado de la batería <i>(en la base de carga)</i> | Intensidad de la señal <i>(en la carátula del reloj)</i> |
|-----------------|---|--|
| Verde | Carga completa | Buena |
| Amarillo | No está cargando/ Ajusta la base de carga | Varía de bueno a pobre |
| Rojo | Bajo el 97% de carga | Sin señal |

Servicio al cliente

¿Tienes preguntas sobre tu dispositivo?

Escanea el código QR a continuación con la cámara de tu teléfono o visita:

medicalguardian.com/support/



Si necesitas asistencia adicional, nuestro equipo de Atención al Cliente puede ser contactado al **1 (800) 313-1191**, de Lunes a Viernes, de 9 a.m. a 8 p.m. EST y los Sábados de 9 a.m. a 5 p.m. EST.

MVM010000