




# MG**Mini***lite*

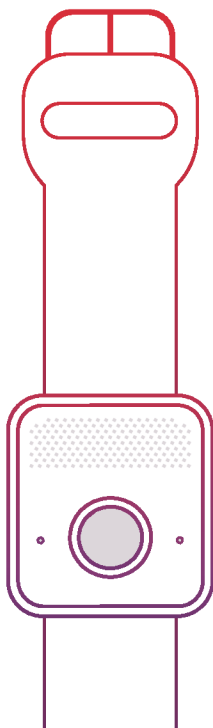

**Protección portátil dondequiera que vayas**

*Impulsado por* **4G LTE**

# Conoce tu dispositivo



**1** Botón de ayuda

**2** Luz de llamada azul / luz de batería roja

**3** Altavoz

**4** Micrófono

**5** Pines de carga

## **Luz roja de batería alrededor del botón de ayuda**

- Mientras se carga, la luz roja de la batería parpadeará cada 5 segundos hasta que el dispositivo esté completamente cargado.
  - Una vez completamente cargado, la luz roja de la batería estará encendida de forma continua.
  - Si la batería está baja, la luz roja de la batería parpadeará lentamente cuando esté fuera de la base de carga.
- 

## **Luz azul de llamada alrededor del botón de ayuda**

- Durante una llamada de emergencia, la luz azul alrededor del botón de ayuda estará encendida de forma continua.
- La luz azul también parpadeará cada 5 segundos mientras se carga.
- Si la luz azul parpadea cada 1 segundo, o si parpadea dos veces seguidas, por favor contacta al Servicio al Cliente para recibir ayuda.

## Cargando tu dispositivo

**IMPORTANTE:** Carga tu dispositivo antes del primer uso para asegurarte de que funcione correctamente.

---

Para cargar, enchufa la base de carga a una toma de corriente y coloca tu dispositivo en la base como se muestra.

El dispositivo debe ser cargado diariamente. La duración de la batería puede variar según la ubicación y la actividad. El tiempo típico de carga es de 2-3 horas.

**NOTA:** Asegúrate de que la toma de corriente eléctrica que uses esté en un lugar conveniente para ti y no esté controlada por un interruptor de luz para garantizar una carga constante.

1

Conecta la base de carga a una toma de corriente eléctrica y espera a que se encienda una luz roja.



2

Localiza los pines de carga dorados en la parte posterior de tu dispositivo. Alinea los pines dorados del dispositivo con los pines dorados en cualquiera de los lados de la base de carga.



3

Coloca el dispositivo en la base de carga y espera un mensaje audible que diga "**Charging**".



## Cómo llamar para pedir ayuda o probar tu dispositivo

- 1 Presiona y mantén presionado el botón de ayuda durante 3 segundos, o hasta que aparezca la luz azul alrededor del botón de ayuda, luego suelta el botón.
- 2 Escucharás una voz y luego tonos o timbres.
- 3 El Centro de Monitoreo responderá la llamada. Indica si necesitas ayuda o si solo estás haciendo una prueba.

**\*Si tu dispositivo no se conecta correctamente, por favor contacta inmediatamente con Atención al Cliente.**

***\*Debes probar tu dispositivo mensualmente.***

---

## Limpia tu dispositivo

Recomendamos limpiar tu dispositivo semanalmente para asegurar una carga adecuada.

Toma un paño suave, como un paño para limpiar gafas, y frota suavemente los contactos dorados en el dispositivo y la base de carga para eliminar suciedad, aceite y residuos.

También puedes rociar limpiador doméstico sobre el paño de limpieza para eliminar residuos (*no rocíes directamente sobre el dispositivo o la base*).

# Cosas que debes saber



## **Cobertura**

Este producto requiere una cobertura celular adecuada para funcionar correctamente. Es importante probar el dispositivo para saber si funciona en tu área. Si experimentas problemas de cobertura, por favor contacta inmediatamente con Atención al Cliente.



## **Carga**

Asegúrate de llevar tu MGMini Lite siempre contigo y cargar tu dispositivo diariamente.



## **Resistente al agua**

El dispositivo es resistente al agua con certificación IP67 y no debe sumergirse. Debe secarse con una toalla después de estar expuesto al agua.



## **Marcapasos**

Las personas con marcapasos deben consultar a sus médicos y revisar sus materiales con respecto a las interacciones con teléfonos celulares, y tomar las mismas precauciones recomendadas para este dispositivo.

# Servicio al cliente

*¿Tienes preguntas sobre tu dispositivo?*

Escanee el código QR a continuación  
con la cámara de su teléfono o visite:

**[medicalguardian.com/support](https://medicalguardian.com/support)**



Si necesita ayuda adicional, puede comunicarse con  
nuestro equipo de Atención al Cliente al 1 (800) 313-1191.  
Lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., hora del este, y  
sábados de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., hora del este.

**BWM010000**